

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 200414

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	中央林間病院 様	機番	300830
環営	所在地	神奈川県大和市中央林間 4-14-18	納入日	2016年03月15日
環品	点検者	中澤一裕 作業時間	受付日	2019年08月22日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年01月27日

修理依頼・不具合内容

水槽から水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果

水槽下部に亀裂が発生しており、ここから水が漏れることを確認しました。
水槽内側から外側にかけて「大きな外力」または「衝撃」がかかったものと思われる。水槽全体を交換して復旧いたしました。

写真1：水漏れ箇所



写真2：交換部品



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.79 ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：装置情報

交換後運転回数：1313 消毒：5073、消毒＋アルコール：3227、リークチェック：3144
自己洗浄：988、アルコール単独：54、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水槽	1 式	

承認

若
20.4.14
井

責任技術者

中
20.4.14
澤

作成

R02.4.14
中澤

（株）IHIアグリテック（旧社名：IHIシバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528