

点検・修理報告書

管理 No. 210410
発行日: 2021年10月1日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月24日 作業時間: 8 Hr
顧客名	AQUA日本橋デンタルクリニック 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100066	運転回数: 6854回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。

原因

・圧力センサに水が侵入し故障したため圧力値にずれが生じ、規定圧力に到達しないために、エラー14が発生したと考えられます。

処置、作業内容

・圧力センサに水が侵入しないように対策致しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 1 日
ご署名 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
太田	小山	三宅