

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2年 6 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号：	300590
作業年月日	令和 2 年 6 月 23 日				作業時間：	HR
顧客名	けやきクリニック				TEL：	048-969-2525
所在地	埼玉県越谷市宮本町3-63-1				ご担当	院長先生
販売店	ニスコ株式会社				ご担当	様
納入年月日	2015 年 6 月 23 日		保証期間 内 □ 外 ☒		付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	5 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ナシ			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 578
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
			□
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
物に問題はありません。			

装置情報	交換後運転回数：	219	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒：	523	殺菌/消毒+7L：	728	
	リークチェック：	0	自己洗浄：	736	7Lノール単独：	1	エア単独：	1
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称		部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤			☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ			☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	マニホールド周辺チューブ			☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1				☒	
オゾンセンサ		☒	1				☒	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 23 日

ご署名 村上 久恵 印

責任技術者	作業者
西野	西野

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444