

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2 年 7 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301447
作業年月日	2020 年 7 月 16 日		作業時間: 402.0 Hr
顧客名	吉川医院 様		TEL: 03-3561-4010
所在地	東京都中央区銀座1-9-17		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ		ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
6/1 ~ 6/30 オゾン水生成異常 (25件) 7/1 ~ 7/13 オゾン水生成異常 (5件) 濃度維持異常 (3件)			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業実施			
水道に鉄さびが多いようです 水温が上がり濃度が不安定になっておりました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 583
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
水圧が低いので給水が遅くなる ことがあります。 処理に問題は ありません。			

装置 情報	交換後運転回数: 379 (更新) (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 269	殺菌/消毒+7L: 452
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7Lアルコール単独: 0
		エア単独: 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	小味