

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年8月25日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500304
作業年月日	2020年8月25日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	さくま内科胃腸科クリニック 様		TEL: 0276-55-2500
所在地	群馬県館林市花山町2576-4		ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル株式会社		ご担当 様
納入年月日	2019年8月7日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	年 / 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/17 E302x1, E110x1, E207x1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	水槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> パルス数 963
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	消毒 チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水槽側コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	運転プログラムバージョン	正常	<input checked="" type="checkbox"/> Ver. 03041T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項


装置情報	交換後運転回数: 171	更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/>	消毒 (総運転回数): 3	消毒 (洗剤洗浄あり): 5分x1 1分x2
	消毒+アル (総運転回数): 168		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 5分x160 1分x8	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 148	7アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/>	1	オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> /	吸盤	<input checked="" type="checkbox"/> 3
交換後 No. 18083253			排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> /	エアフィルター	<input type="checkbox"/>
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ; フィューズ側	<input type="checkbox"/>	水フィルター	<input checked="" type="checkbox"/> /
180528-008			オゾン水濃度計用フィルタ	<input checked="" type="checkbox"/> /		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年8月25日

ご署名 佐久間 美代枝 

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
早坂	2020.8/25 