

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 9 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500430
作業年月日	2020 年 9 月 9 日		作業時間	Hr
顧客名	南与野駅内科クリニック 様		TEL	048-851-5522
所在地	埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-548-8		ご担当	様
販売店	株式会社メディセオ		ご担当	様
納入年月日	2019 年 9 月 27 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

定期点検作業実施 フロントガラス洗浄

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 667
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒	
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0304/T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。きれいに使用頂いていますので、引き続きよろしくお願いいたします。

装置 情報	交換後運転回数: 426	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 1	消毒 (洗剤洗浄あり): 0
	消毒+アル (総運転回数): 425		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	
	リークチェック: 5	自己洗浄: 170	7Lコールド: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィル	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 9 日

ご署名 根本 和子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

