

点検・修理報告書

管理 No. 210424

発行日: 2021年9月3日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月3日 作業時間: 8 Hr
顧客名	公園都市プラザわかば歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 外 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300090	運転回数: 373回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。

2. ドアを開けるときの爆発音と同時に風圧がくる。

原因

1. ドアロックを検知するセンサの位置が少しずれていたために、運転中にドアが閉まっているのに誤って開いていると判断し、エラー12が発生したと考えられます。

2. 運転終了後は缶内が熱くなっています。この状態でドアを閉めると、空気が暖められて圧力があがります。

・電源を切っていませんか。電源を切った状態では電磁弁が閉まった状態のため、缶内の圧力が上がり、今回の事象がおきます。

処置、作業内容

1. ドアロック機構の調整をいたしました。

2. 運転終了後にドアを閉める場合は、電源は入れたままにしてください。

電源を切った状態でドアを開けてしまった場合には、電源を入れて10秒程度経過してからドアを開けてください。

電源を入れると電磁弁が開き、缶内の圧力が下がります。

特記事項

・配管に汚れがありましたので、清掃いたしました。

・給水タンクのL側フロートスイッチの反応が悪いので、交換しました。

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 給水フロートスイッチ		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 中山いづみ (大塚)

修理業者 株式会社IH物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山形
'21/9/3	'21/9/3	'21/9/3