

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-54242

No. 201201

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
環営	環品	顧客名	松本内科消化器クリニック 様	機番	300203
		所在地	埼玉県坂戸市溝端町8-9	納入日	2014年03月25日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	2020年08月27日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年11月26日

修理依頼・不具合内容

保守点検 および オーバーホール

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

劣化した部品を交換し、保守点検、オーバーホールを実施しました。

写真1：ポンプ、基板、電磁弁

写真2：定期交換部品、ドレンバルブ

写真3：配管パッキン、フタパッキン

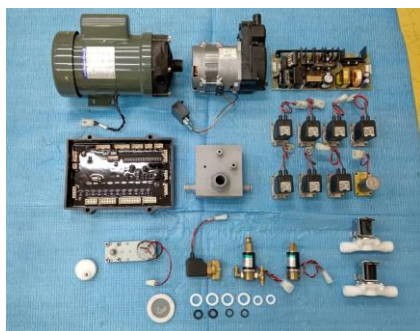

〔2〕作業内容

1：部品交換・写真と下表をご参照ください

2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・正常

3：出荷時の装置情報

消毒：10120、消毒＋アルコール：1、リークチェック：0

自己洗浄：463、アルコール単独：0、エア単独：3

交換部品

承認

松

20.12.02

永

責任技術者

中

20.12.01

澤

作成

R02. 12. 1

中澤

消毒：10120、消毒＋アルコール：1、リークチェック：0

自己洗浄：463、アルコール単独：0、エア単独：3

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備 考
1～2	メインポンプ、排水ポンプ	1 式	
3	ドレンバルブ ASSY、DCモータ、加	1 式	
4～5	マニホールドブロック、マニホールド電磁弁	1 式	
6～8	酸素、給水、アルコールライン電磁弁	1 式	
9～10	配管パッキン、フタパッキン、24V 電源、基板	1 式	Ver. 0209 LED3. 3V
11	保守点検（定期交換部品）	1 式	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIシバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

Ver3.1