

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-54239

No. 201201

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	O E D－ 1 0 0 0
客先	1	顧 客 名	みずほ台病院 様			機 番	1 0 0 2 3 2
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	埼玉県富士見市西みずほ台 2-9-5			納 入 日	2011 年 07 月 26 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	2020 年 08 月 25 日
計	3	返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	2020 年 11 月 16 日

修理依頼・不具合内容

タッチパネルのキー操作が効かない時がある

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

タッチパネルのキー操作は、基板とタッチパネルで信号をやりとりしています。
不具合は再現しませんでした。関係する部品を全て交換しました。
併せてクリーニング（部品交換）を実施しました。

写真1：タッチパネル

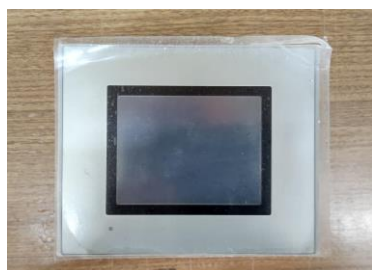


写真2：フタ、コントロール基板、水槽フィルタ、プレート



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71 ppm・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数 1333 殺菌：8606、殺菌＋アルコール：8178、リークチェック：107
自己洗浄：2489、アルコール単独：185、エア単独：27

承認
松 20.12.02 永
責任技術者
中 20.12.02 澤
作成
R02.12.1 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	コントロール基板	1	Ver.0209 LED3.3V
2	タッチパネル	1	調査のため無償
3	フタ、水槽フィルタ、プレート	1式	無償