

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 1 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300166
作業年月日	2020 年 1 月 21 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	フォレストサイドクリニック 様		TEL: 028-684-2775
所在地	栃木県宇都宮市西川田 6-6-17		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 1 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 627
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ アダプタ、1.25mm 管化 (有)
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	アルミノック	☒ 交換 (青)

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 298	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1687	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 952	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田 6 丁目 6 番 17 号

医療法人
リーフ フォレストサイドクリニック

院長 責任技術者 松本 光正

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

TEL 028-684-2775 FAX 028-684-2776

早坂