

点検・修理報告書

管理 No. 210437

発行日: 2021年9月27日

IC Clave			
作業年月日	2021年9月15日	作業時間: 8 Hr	
顧客名	オアシス歯科クリニック 様	TEL:	
所在地		ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100430	運転回数: 1118回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
2. エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。		
3. エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
4. エラー 1 8 滅菌異常が発生した。		
原因		
1. 給水タンクにぬめりがあり、水の流れを阻害しておりました。そのため、蒸気発生器が空焚き状態となり、エラー 1 1 が発生したと考えられます。		
2. 圧力センサーの故障により、正確な圧力を検知できず、エラー 1 2, 1 4, 1 8 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・給水タンク、給水フィルター、蒸気発生器を清掃いたしました。		
・圧力センサーを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 10 月 5 日

ご署名 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者