

株式会社IHI物流産業システム  
環境ソリューションBU サービスグループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHI用

|     |    |                   |         |                    |     |  |
|-----|----|-------------------|---------|--------------------|-----|--|
| お客様 | 名称 | 代官山矯正歯科 様         | 製造番号    | 100559             | ご確認 |  |
|     | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-30-14 | 納入日     | 2021年10月5日         |     |  |
|     |    |                   | 納入検査実施者 | エムシーサービス株式会社 金子・笹尾 |     |  |

| 項目    | 判定 | 検査項目                           | 項目     | 判定   | 検査項目                                |    |
|-------|----|--------------------------------|--------|------|-------------------------------------|----|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                         | 外装・設置  | ✓    | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |    |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                  |        | ✓    | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                  |        | ✓    | キズ・汚れ                               |    |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                |        | ✓    | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |    |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態               | スペース   | ✓    | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |    |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                | 制御     | ✓    | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ         |        | ✓    | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                       |        | ✓    | ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)            |    |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                   |        | 有(無) | 温水使用切換                              |    |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ               | 評価機能   | ✓    | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                |    |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)  |        | ✓    | 周波数と設置ICWの一致                        |    |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水／湯逆配管NG)    | その他    | ✓    | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |    |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)      |        | ✓    | 運転・お手入れ方法の説明                        |    |
|       | ✓  | 給湯温度(45～50℃)                   |        | ✓    | 装置内運転時異音・振動                         |    |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ              | 運転検査結果 | ☑    | 良好                                  | トシ |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                |        | □    | 不良                                  |    |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                    |        |      |                                     |    |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                   |        |      |                                     |    |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) |        |      |                                     |    |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ             |        |      |                                     |    |

特記事項

株式会社IHI物流産業システム  
 環境ソリューションBU サービスグループ  
 〒704-8122  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL 086-944-6528  
 FAX 086-942-9030

## クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

|     |    |                     |         |            |     |                                                                                     |
|-----|----|---------------------|---------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称 | 代官山矯正歯科様            | 製造番号    | 200200     | ご確認 |  |
|     | 住所 | 京都府京都市東山区豊楽町1-30-14 | 納入検査実施日 | 2021年10月7日 |     |                                                                                     |
|     |    | エー・エー・エー2F          | 納入検査実施者 | ILM 以下     |     |                                                                                     |

| 項目      | 判定 | 検査項目                                                        | 項目    | 判定 | 検査項目                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------|
| ドア・パッキン | ✓  | ハンドル開閉検出確認                                                  | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ      |
|         | ✓  | ドアロックユニット作動確認                                               |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認        |
|         | ✓  | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ                                            |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態            |
|         | ✓  | ハンドルキズ・汚れ                                                   |       | ✓  | SDカードの挿入・取外性           |
| 缶体      | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無                                              |       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと |
|         | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ                                                  |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ     |
|         | ✓  | 棚、トレーのキズ・汚れ                                                 | 外装・設置 | ✓  | 本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。  |
|         | ✓  | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性                                         |       | ✓  | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク   | ✓  | 給水タンクの内部汚れ                                                  |       | ✓  | キズ・汚れ                  |
|         | ✓  | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性                                           | 制御    | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷      |
|         | ✓  | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い                            |       | ✓  | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)  |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |       | ✓  | タッチパネル表示確認・履歴の確認       |
|         | ✓  | LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                      | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施               |
| 排水タンク   | ✓  | タンク内に汚れはないか                                                 |       | ✓  | リークチェックテスト             |
|         | ✓  | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                                      |       | ✓  | 0点調整                   |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        | その他   | ✓  | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付    |
| スペース    | ✓  | 設置スペースの確保<br>右90×左50×背面75×天面250mm以上<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |       | ✓  | 運転・お手入れ方法の説明           |
|         |    |                                                             |       | ✓  | 装置内運転時異音               |

### 特記事項

200182-200200

