

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 3 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300816
作業年月日	令和 3 年 3 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	さいたま新開橋クリニック 様		TEL： 027-346-1226
所在地	埼玉県さいたま市西区宮前町408-1		ご担当 027-795-4260 様
販売店	サンメディックス株式会社 埼玉営業所		ご担当 様
納入年月日	2018 年 10 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E:202 消毒時給水量異常 E:200 消毒圧力異常			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 475
オゾンセンサ	正常 ☒ 0 ~ 1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常あり。そろそろオゾンホールドをお取り換えしなさい。（現在約2,000日使用） (8,000 ~ 10,000日)			

装置情報	交換後運転回数： 1852	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 10021	殺菌/消毒+7L： 2153
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1703	7Lアルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	73
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	消毒チューブ	E-101	☒	1
オゾンセンサー		☒	1	"	E-103	☒	1

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 菊地 優子	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者