

## 点検・修理報告書

管理 No. 210768

発行日: 2021年12月23日

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC Clave |                                                                                                                                    |
| 作業年月日    | 2021年12月10日 作業時間: 8 Hr                                                                                                             |
| 顧客名      | 等々力歯科室 様 TEL: 03-3702-0811                                                                                                         |
| 所在地      | 東京都世田谷区等々力3-5-2 ヒューリック等々力2F ご担当 様                                                                                                  |
| 販売店      | ご担当 様                                                                                                                              |
| 納入年月日    | 2020 年 10 月 22 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                                    |
| 作業区分     | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |
| 出張・引取    | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                                           |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                                                                      | 製造番号: 300034 | 運転回数: 787回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                           |              |            |
| 1. エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。                                                 |              |            |
| 2. エラー 2 6 停電異常が発生した。                                                     |              |            |
| 3. 焦げ臭いにおいがする。                                                            |              |            |
| 原因                                                                        |              |            |
| 1. ラジエータの接続配管がはずれておりました。そのために、真空引きしても圧力が低下せず、エラー 1 2 が発生したと考えられます。        |              |            |
| 2. 上記配管がはずれたときに、スイッチング電源に水がかかり、保護回路が作動し直流電圧が低下したために、エラー 2 6 が発生したと考えられます。 |              |            |
| 3. 蒸気ヒーターの故障により、焼けた臭いを発生しておりました。                                          |              |            |
| 処置、作業内容                                                                   |              |            |
| 1. 配管を再接続いたしました。                                                          |              |            |
| 2. スwitchング電源を交換いたしました。                                                   |              |            |
| 3. 蒸気ヒーターを交換いたしました。                                                       |              |            |
| 特記事項                                                                      |              |            |
| ・最新の状態にバージョンアップいたしました。                                                    |              |            |
| ・蒸気発生器のOリングを交換しました。                                                       |              |            |

|   | 交換部品名称   | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|----------|-------------|--------|----|----|
| 1 | スイッチング電源 |             | 1      |    |    |
| 2 | 蒸気ヒーター   |             | 1      |    |    |
| 3 | Oリング     |             | 1      |    |    |
| 4 |          |             |        |    |    |
| 5 |          |             |        |    |    |
| 6 |          |             |        |    |    |
| 7 |          |             |        |    |    |
|   |          | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |          |             | 技 術 料  |    |    |
|   |          |             | 出 張 料  |    |    |
|   |          |             | 合 計    |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 11 日

ご署名

首藤 菜保



修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

| 品証 | 責任技術者 | 作業者 |
|----|-------|-----|
| 菊池 | 小山    | 大黒  |