

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-77754

No. 21412

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	はやし内科クリニック 様	機番	100684
環営	所在地	東京都西東京市東町 6-6-10 西東京メディカルモール	納入日	2013年03月30日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		2020年12月15日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年04月05日

修理依頼・不具合内容

電源が入らない。直流電源故障。

不具合原因（故障箇所）と処置


〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

工場では「IHI OED-1000」画面でフリーズする現象を確認しました。
直流電源の他にタッチパネル、基板がダメージを受けていたので交換いたしました。
また、保守点検に伴う定期交換部品を交換いたしました。

写真1：定期交換部品

写真2：直流電源

写真3：タッチパネル、基板

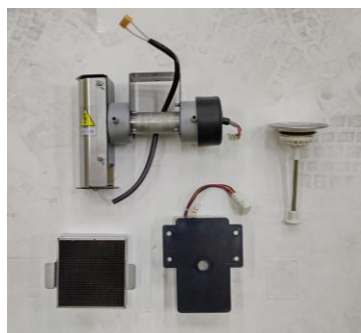

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72 ppm・・・正常
- 出荷時の装置情報
 - 消毒：1305、消毒＋アルコール：0、リークチェック：0
 - 自己洗浄：1145、アルコール単独：0、エア単独：3

承認

松
21.04.12
永

責任技術者

中
21.04.12
澤

作成

R03.4.12
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 オゾン水濃度計、オゾンセンサ、フィルタ、触媒、排水栓	1式	濃度計 No. 17112928 バルブ：847
2	直流電源	1台	
3	タッチパネル、コントロール基板	1台	Ver0209/T05C LED3.3V
4	アルコールタンクキャップ	1個	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1