

点検・修理報告書

管理 No. 210242
発行日：2021 年 7 月 13 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 7 月 13 日	作業時間：	6 Hr
顧客名	木村歯科 様	TEL：	
所在地	東京都世田谷区船橋 1-38-7	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 12 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060107	運転回数：	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー 8 循環水圧低下異常発生			
原因			
・層内のフィルターが詰まっていた。			
処置、作業内容			
・排水ポンプが停止していましたのでオーバーホールしました。			
・フィルターを清掃しました。			
特記事項			
・			
・			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 5 日

ご署名

木村 高夫

修理業者

株式会社IHI物流産業システ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	環境SBUサービス	環境SBUサービス
'21/07/13	'21/07/13	'21/07/13
池	富田	安田

【代替機】点検・修理依頼書 ※スライド貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

依頼内容	点検
	修理

貸出先

木村 忠 科 (東京) 様

案件番号

設置時の運転回数

2 回

回収時の運転回数

61 回

回収日

2021. 8. 5

回収者

MC 中村 忠 科 青木

機種	ICC
	ICW
	BC-17
	WD-150

機番

1406 0074

※記入時お願い※
違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。
(X)異音がある → (O)本体下部からこすれたような音がある
(X)水漏れがある → (O)全面左下のドアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】
<ICW・WD>
☐ 水
☒ 水&温水

【ラック・バスケット種類】
<ICW・WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
 有 無
 <SUSフィルター洗浄>
 有 無

【設置場所】
☐ 作業台上
☒ シンク下
☐ その他 ()

【その他特筆事項】
・ エラーは ユーザーによる停止1回のみ
.....
.....
.....
.....
.....
.....

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無