

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	7240	作業日/納入日	2022/02/01(火)	ご依頼日/受付	2022/01/24(月)
お得意様	羽田エイル歯科・矯正歯科 様			ご依頼者	様
住所	東京都大田区東糀谷3-6-11			室名	
TEL	03-6423-7665			保守契約	
実施センター	首都圏C	TEL	049-249-6572	作業者	鈴木一紀
同行		同行		同行	
メーカー	I H I 物流産業システム	型式	IC Washer-		
機種名	ウォッシャー・イスンフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
		製造番号	100367	運転回数	1632 回
機器2型		製造番号		機器3型	
機器4式				機器5式	
作業区分	点検(既存)	完了・継続	完了	継続	有料・無料
					有料 無料
請求先	株式会社 I H I 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	定期保守点検		原因
	エラーNo・コード		

処置	☒ 部品交換	☒ 各部増締	定期保守点検実施 各部水漏れ確認、単独動作確認、時刻合わせ 定期点検時期リセット実施
	☒ 各部清掃	☒ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☒ 設定・PG確認	
	☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☒ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考
	-100	ドアパッキン	2.00					
	-100	プレフィルター	1.00					
	-100	HEPAフィルター	1.00					
	-100	洗剤、仕上剤ホソチューブ	2.00					
	-100	ジョイントゴム	1.00					
	-100	フィルター-3	1.00					

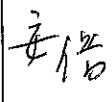
作業費用	技術料	H X 名 X 30,000 円 =	30,000 円	合計	部品合計	円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 146 km X 1 回 =	14,600 円		作業合計	54,020 円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円
	諸経費		3,000 円			円
	高速代		6,420 円		税別合計金額	54,020 円
			円		消費税(10%)	5,402 円
			円		ご請求額	59,422 円
			円			

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書	納品書No.
鈴木	安倍	鈴木			

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様用

お客様	名称	エイル歯科 矯正歯科 様	製造番号	100367	点検実施日	2022年11月	ご承認印	
	住所	東京都大田区本羽田 2-3-1	運転回数	1632	点検実施者	鈴木 一紀		
	納入場所	ホームセンターコーナートン田中店3	サービス形態	定期保守点検	モリタ担当者			

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン ☆ ショイトゴム
- ☒ プレフィルタ ☆ フィルタ-3
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

☒ 合 ☐ 否
--

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030