

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	大神宮デンタルクリニック 様	製造番号	100580	ご確認 石
	住所	千葉県船橋市宮本2-9-8	納入日	2022.1.24	
			納入検査実施者	株式会社IHI物流産業システム 青木 直樹	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換 (ハントピースラック)標準ラック	
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明	
	—	給湯温度(45~50℃)		✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☑	良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		□	不良	
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)				
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ					

特記事項

温水配管もよすが、こいるが、水温確認できず。
 施設工事、図面をモリヤさんに見せたり、取付を行った。

安全説明確認カード

下記の販売説明員から装置の安全な取り扱いと操作及び保証書の内容について、説明を聞きました。

●説明日	2022年 / 月24日
●お客様ご住所	〒2713-0003 千葉県船橋市宮本2-9-8
●お電話番号	☎047(455)3730
フリガナ ●お客様のお名前 (署名)	イヅク リンサク 石毛 俊作

●販売店住所	〒124-0022 東京都板橋区豊戸7-6-10
●販売店名	K.O. テンブル 株式会社 板橋営業所 ☎03(5698)8781

●納入説明者氏名	小笠原 健
----------	-------

●ご購入商品と
製造番号

形式名	製造番号
IC Washer	100580

備考

①メーカー控え
(説明者→(株)IHIAグリテック)