

保守点検・修理 報告書

発行日：令和 3年 4 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒				製造番号： 300761
作業年月日	令和 3 年 4 月 23 日	Hr			
顧客名	清水胃腸科内科クリニック 様				作業時間：
所在地	群馬県高崎市町屋町627-1				TEL： 027-360-4771
販売店	株式会社 メディセオ				ご担当 様
納入年月日	2016 年 2 月 22 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	5 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/6.8/F:302 濃度維持異常
8/20 E:110.207 オゾン水生成異常
11/28 E:202 消毒時給水量異常

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目	殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	正常 ☒
酸素ライン	☒	正常 ☒
アルコーラルライン	☒	正常 ☒
オゾンセンサ	☒	正常 ☒
給水ライン	☒	正常 ☒
濃度計流量	☒	正常 ☒
水位センサ	☒	正常 ☒
水漏れ確認	☒	正常 ☒
清掃	☒	正常 ☒
トレー	☒	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	☒	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

装置情報	交換後運転回数：1095	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施	殺菌/消毒：5557	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1194	7L単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	排水用新型活性炭フィルタ		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾンセンサ		☒	1	LEDセン	4-75	☒	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 23 日

清水胃腸科・内科クリニック

院長 清水 直樹

ご署名 高崎市 町屋 6-2-7 1

TEL 027-360-4771 貸租技術者 027-360-4771

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

