

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-76152

No. 200626

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	松の木三丁目クリニック 様	機番	500294
環営	所在地	東京都杉並区松ノ木 3-26-3	納入日	2019年07月10日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2020年07月14日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年08月5日

修理依頼・不具合内容

エアレーション（送気）しない
※運転プログラム更新後に発生

不具合原因（故障箇所）と処置

この度は不具合を発生させてしまい、大変申し訳ありませんでした。
下記の通りご報告いたします。


〔1〕点検結果

空気が流れないことを確認いたしました。分解点検したところ、送気管路にある
エアフィルタに水が浸入しており、これが不具合の直接原因でした。

また、運転プログラム更新作業でエアフィルタに水が浸入するか検証しましたが
浸入しませんでした。

念のためにこの不具合に関する部品を全て交換しましたので、様子を見てくださいますよう
お願いいたします。

写真：交換部品一式

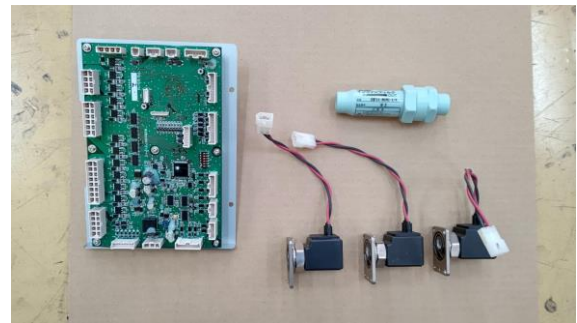

〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69 ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：装置情報

運転プログラム Ver0304/T12A

交換後運転回数：50 消毒：468/294、消毒＋アルコール：364/342、リークチェック：234
自己洗浄：219、アルコール単独：0、エア単独：10

承認

若
20.08.06
井

責任技術者

中
20.08.06
澤

作成

R02.8.6

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	エアフィルタ	1	
2	電磁弁	3	SV8、SV9、SV12
3	コントロール基板	1	

（株）IHI アグリテック（旧社名：IHI シバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528