

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-54241

No. 201019

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	0ED-1000S Plus
客先	顧客名	間柴医院 様			機番	500485
環営	所在地	埼玉県飯能市緑町 3-4			納入日	2020年02月26日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2020年09月17日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	2020年10月14日

修理依頼・不具合内容

9/2, 3 消毒時給水異常※ (E:202) が発生し、排水栓を交換しても改善しない

※給水工程が 10 分経過しても終わらないと発生します

不具合原因（故障箇所）と処置

修理が遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

消毒時給水異常は再現しませんでした。

分解点検したところ、水位レベルセンサーの検知感度が不安定で、水を正常に検知しない状態が時々発生していることを確認しました。

この部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72 ppm・・・正常

3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：237 消毒：15/1、消毒＋アルコール：222/140、リークチェック：0

自己洗浄：97、アルコール単独：0、エア単独：1

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	水位センサ (LVH)	1 個	

承認



責任技術者



作成

R02. 10. 19

中澤

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

Ver3.1