

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300163
作業年月日	平成 26 年 1 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	酒井医院		TEL: 0439-52-2166
所在地	千葉県君津市南子安9-18-8		担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 25 年 1 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合・異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 390
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒ 排水しずみ
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒ 水漏れ
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	オゾン水	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが破れ交換済み

装置 情報	交換後運転回数: 160	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 14	消毒+7L: 146
	リークチェック: 0	自己洗浄: 139	アルコール単独: 0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 1 月 21 日

ご署名 矢田 君江 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

山本