

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100374
作業年月日	平成 26 年 1 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	水野胃腸科内科医院		TEL: 043-261-0613
所在地	千葉県千葉市中央区今井2-2-10		担当 様
販売店	株式会社 スズケン		担当 様
納入年月日	平成 23 年 12 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 <u>3</u> 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合はなし			
不具合原因、作業内容			
OED-1000定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 <u>893</u>
オゾンセンサ	正常 ☒ <u>248</u>	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.73</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
チューブ接続コネクタが破損したため新品にかわりました。			

装置 情報	交換後運転回数: <u>881</u>	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: <u>126</u>	殺菌+7L: <u>2026</u>
	リークチェック: <u>0</u>	自己洗浄: <u>638</u>	アルコール単独: <u>1</u>	エア単独: <u>9</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	内視鏡接続コネクタ		☒	<u>2</u>
排水栓		☒	<u>1</u>			☐	
オゾン水濃度計		☒	<u>1</u>			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	<u>1</u>			☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄		27 年 1 月 21 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	<u>山本 洋治</u>	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	<u>山本</u>