

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号 : 300051
作業年月日	平成 27 年 9 月 24 日		作業時間 : Hr
顧客名	おやま内科クリニック		TEL : 042-860-0326
所在地	東京都町田市小山町233-1		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 25 年 9 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 462
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒	フィルター	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが灰色の部品に変更
一月の最後に自己洗浄をしております

装置 情報	交換後運転回数 : 485	更新（リセット）実施・未実施	消毒 : 172	消毒+7L : 517
	リークチェック : 6	自己洗浄 : 2	アルコール単独 : 0	エア単独 : 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 9 月 24 日

ご署名 佐々木 俊行 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

