

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号 : 300334
作業年月日	平成 27 年 7 月 28 日		作業時間 : Hr
顧客名	しらベクリニック		TEL : 029-240-9800
所在地	茨城県東茨城郡城里町上戸886-1		担当 様
販売店	株式会社メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 26 年 7 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9:26 オゾン水生成機点検 (P:110)

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 360
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	オゾン水	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

全点検終了 1台77分 所要時間1時間

装置 情報	交換後運転回数 : 276	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 : 4	消毒+7L : 272
	リークチェック : 98	自己洗浄 : 276	7L単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成27年 7 月 28 日

ご署名

調 徳也

調

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

山本