

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100547
作業年月日	平成 27 年 7 月 31 日		作業時間: Hr
顧客名	中田内科クリニック		TEL: 0422-28-4600
所在地	東京都武蔵野市吉祥寺北町2-1-14		担当 様
販売店	ニスコ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張/引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合、異常はなし	
不具合原因、作業内容	
OED-1000定期保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 558
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	パイプ類 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
チューブ接続コネクタの取付け変更	

装置 情報	交換後運転回数: 195	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 232	殺菌+7L: 811
	リークチェック: 0	自己洗浄: 206	7L単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
平成 27 年 7 月 31 日 ご署名 <u>中田</u> 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本