

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100088
作業年月日	平成 26 年 4 月 22 日		作業時間: Hr
顧客名	ほり医院		TEL: 0478-86-5315
所在地	千葉県香取郡東庄町新宿1054		担当 様
販売店	オクトパスメディカル		担当 長妻 様
納入年月日	平成 22 年 12 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合や異常はありませんでした。

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 873
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒ (7/11/17)		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

作業終了後、フタを開けてスコープを取り出し、9/11/17の殺菌槽を交換して電源を切り、後にコレクタを交換して下さい。 Ver.1/03 → Ver.4/07

装置 情報	交換後運転回数: 34 (52) 更新 (リセット) ☒ 未実施	殺菌: 75	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1	アルコール単独: 0
			エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

426 年 4 月 22 日

ご署名

張 唯一

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

