

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100775
作業年月日	平成 27 年 4 月 23 日		作業時間: Hr
顧客名	川口クリニック		TEL: 0423-97-3741
所在地	東京都東村山市本町2-3-2		担当 様
販売店	株式会社メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 25 年 6 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☐ 清掃 ☐
 トレー 正常 ☒ 接合部にヒビ
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☐
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒
 フジフィルム 正常 ☒

バルブ数 465

履歴 0.71 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ホフ接続コネクタが灰色の部品に変更

装置 情報	交換後運転回数: 1653	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 1426	殺菌+7L: 1676
	リークチェック: /	自己洗浄: 460	アルコール単独: 0	エア単独: /

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	排水用系巻取りルーフ		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 23 日

川口クリニック

医師 川口敏樹

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷 3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

