

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300255
作業年月日	平成 27 年 5 月 8 日		作業時間: Hr
顧客名	きたむらクリニック		TEL: 045-750-3360
所在地	神奈川県横浜市磯子区磯子3-13ブリリアシティ横浜磯子K1F		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水注意 (F:111) 8/22 8/25 9/8 9/16 排水異常 2 (F:902) 9/8
光量低下異常 1 (F:210) + ランプ切れ異常 (F:212) 3/3

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒	バルブ数 651
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	履歴 0.69 ppm
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	左下 11-セン交換	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒			正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

左 - プ接続コネクタが灰色の部品の交換

装置 情報	交換後運転回数: 140	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒: 15	消毒+7L: 125
	リークチェック: 0	自己洗浄: 126	7Lコールド: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	左下 11-セン		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 5 月 8 日

ご署名 北村 剛彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

