

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 150121

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	茅ヶ崎信愛クリニック 様		機番	100690
環営	所在地	神奈川県茅ヶ崎市新栄町 5-8		納入日	平成 25 年 7 月 30 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 26 年 12 月 16 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 1 月 8 日

修理依頼・不具合内容


オーバーフロー異常（E:205）が発生して運転不能
（オーバーフロー異常・・・水槽の水位が規定より高くなると、水位レベルセンサが検知して発生します）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転直後の水位が低い状態で「オーバーフロー異常」が再現しました。
原因はコントロール基板の不具合で、水位の信号が不安定な状態でした。
この部品と、水位レベルセンサを交換して復旧いたしました。

写真：水位レベルセンサ、コントロール基板

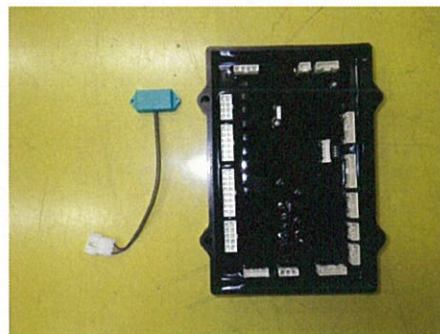

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表と写真を参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報
交換後運転回数：138 殺菌：372、殺菌＋アルコール：0、リークチェック：1
自己洗浄：58、アルコール単独：0、エア単独：1

一以上一

承認

安
15.1.21
田

審査

中
27.1.21
澤

作成

H27. 1. 21
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	水位センサ（LVHH）	1 個	
	水槽側コネクタ	2 個	

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528