

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

No. 210312

|     |    |     |                        |             |             |
|-----|----|-----|------------------------|-------------|-------------|
| 配布先 | 客先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 福岡支店 殿        | 機種          | OED-1000    |
| 環営  | 環品 | 顧客名 | 小川町メディカルクリニック 様        | 機番          | 301189      |
|     |    | 所在地 | 東京都千代田区神田小川町 2-12 進興ビル | 納入日         | 2017年06月09日 |
|     |    | 点検者 | 中澤一裕                   | 作業時間        |             |
|     |    | 受付日 |                        | 2021年02月01日 |             |
| 計   | 3  | 返送先 | 納入先と同じ                 | 出荷日         | 2021年03月日   |

## 修理依頼・不具合内容

排水異常(E:401), 排水注意(E:111) 頻発  
※2020年10月オーバーホール後 931 回運転

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水栓の開き具合が悪く、排水がスムーズに流れない状態でした。分解点検したところ排水栓を上下する部品（ポップアップ）が故障しておりました。  
この部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品：ポップアップ



### [2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm）：0.70 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数:931 殺菌：9233、殺菌＋アルコール：2118、リークチェック：0  
自己洗浄：892、アルコール単独：13、エア単独：3

|                    |
|--------------------|
| 承認                 |
| 松<br>21.03.12<br>永 |
| 責任技術者              |
| 中<br>21.03.12<br>澤 |
| 作成                 |
| R03.3.12<br>中澤     |

| 交換部品 |        |    |    |
|------|--------|----|----|
| 部品番号 | 部品名称   | 数量 | 備考 |
| 1    | ポップアップ | 1  |    |
|      |        |    |    |
|      |        |    |    |
|      |        |    |    |

（株）IHI アグリテック （旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1