

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 8 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301310
作業年月日	令和 3 年 8 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	彩のクリニック 様		TEL： 04-2949-1118
所在地	埼玉県所沢市小手指4-1-1		ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社		ご担当 様
納入年月日	2017 年 11 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
7/6 E:300 水位低下異常 8/21 E:302 殺菌槽内異常 8/10 E:110 オゾン生成故障 → シャワー工程 6 月に変更しました。			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 5/1
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題はありません。オゾン水バルブの交換時期と見られます。(8,000~10,000回目安)			

装置情報	交換後運転回数： 1586	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 8098	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 13	自己洗浄： 485	7Lコル単独： 0	エア単独： 22

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルター	糸巻き	☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

新井 美奈子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

