

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 9 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300973
作業年月日	令和 3 年 9 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	大島クリニック 様		TEL： 048-654-0053
所在地	埼玉県さいたま市北区本郷町558-1		ご担当 様
販売店	株式会社 メディセオ		ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 オートフロ-口に水滴→結露している。換気できている。

不具合原因、作業内容
 定期保守点検作業実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 612
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ 継ぎ口キャップ交換	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 特に問題はありません。

装置 情報	交換後運転回数： 402	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 953	殺菌/消毒+アル： 1814
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1209	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルタ	糸巻き	☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	継ぎ口キャップ		☒	1

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 14 日
 大島昌宏 印
 ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野