

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-79773

No. 211013

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	調布おなかと内科のクリニック 様			機番	301208
環営	所在地	東京都調布市布田 1-50-1 フジヨシビル 2 階			納入日	2017 年 07 月 10 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021 年 08 月 02 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021 年 10 月 08 日
計	3					

修理依頼・不具合内容

機械本体からの酸素漏れ

8/4 新しいポンペに交換して消費量に差が無い確認中

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

酸素ガスが流れる配管機器を中心に分解点検しましたが、漏洩箇所はありませんでした。念のために酸素ガスを制御する基板と減圧弁を交換しましたので様子を見てくださいますようお願い申し上げます。同時に保守点検を実施しました。

写真：酸素ガス減圧弁

コントロール基板

定期交換部品



[2] 作業内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.7ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

交換後運転回数：1572→0 殺菌：5143、殺菌＋アルコール：3731、リークチェック：0
自己洗浄：952、アルコール単独：26、エア単独：4

承認
松永
21.10.13
責任技術者
中澤
21.10.13
作成
R03. 10. 13
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	酸素ガス減圧弁	1	
	コントロール基板	1	Ver0209/T05C
	定期交換部品 オゾン水濃度計、排水栓、脱気フィルタ、触媒、センサ	1 式	濃度計 15092125 バルス 740