

保守点検・修理 報告書

真ん中

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		
作業年月日	令和 3 年 10 月 26 日		
顧客名	所沢肛門病院 様	TEL :	04-2926-7521
所在地	埼玉県所沢市小手指1-3-3	ご担当	平野 様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2020 年 2 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E:109 E:213 E:109 E:202 E:215 E:109

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 808
オゾンセンサ	正常 ☒ 7	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / TRA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

エラーが散発していましたが、その後の運用状況から特に問題はありません。

装置 情報	交換後運転回数 : 2464 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数) : 4633 / 消毒 (洗剤洗浄あり) : 0
	消毒 + アル (総運転回数) : 0	/ 消毒 + アル (洗剤洗浄あり) : 0
	リークチェック : 31	自己洗浄 : 537
	アルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	/	オゾン分解触媒	☒ /	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ /	エアフィルター	☒ /
オゾンセンサー	☒	/	接続コネクタ : チューブ側	☒ 2	水フィルター	☒ /
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ /	給水系巻フィルタ	☒ /
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 近藤 美果 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

西野