

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	02-78349	No. 21412
--------	----------	-----------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	富士クリニック 様	機番	300137
環営	所在地	東京都西東京市富士町 4-6-9	納入日	2013年10月07日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2021年03月25日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年03月31日

修理依頼・不具合内容

水槽底部、ドレン配管継手のナット部分より水漏れ

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

水漏れを確認しました。
パッキンが劣化していましたので、これを交換して復旧しました。

写真1：水漏れ箇所



写真2：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.72 ppm・・正常
- 3：出荷時の装置情報

消毒：1085、消毒+アルコール：1、リークチェック：0

自己洗浄：8、アルコール単独：0、エア単独：3

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンバルブ ASSY ナット、パッキン	1式	
2	アルコールタンクキャップ	1個	

承認	松
	21.04.12
	永
責任技術者	
	中
	21.04.12
	澤
作成	
R03.4.12	
中澤	