

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-78502

No. 210827

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	三鷹中央病院 様			機番	100589
環営	所在地	東京都三鷹市上連雀 5-23-10			納入日	2012年12月11日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021年03月05日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021年08月25日
計	3					

修理依頼・不具合内容

保守点検 および オーバーホール

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

劣化した部品を交換し、保守点検、オーバーホールを実施しました。

〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.69 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報
消毒：2518、消毒＋アルコール：10621、リークチェック：0
自己洗浄：911、アルコール単独：44、エア単独：6

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 濃度計、フィルタ、触媒、排水栓、オゾンセンサ、コネクタ	1式	濃度計 No. 17022661 パルス 745
2～4	メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ	1式	
5～6	排気ファン、ドレンバルブ ASSY	1式	
7～8	マニホールド電磁弁、ブロック	1式	
9～10	酸素電磁弁、給水電磁弁	1式	
11	アルコールライン電磁弁	1式	
12	配管パッキン、フタパッキン	1式	
13	リークチェック配管	1式	
14	コントロール基板；OED-1000S 型	1式	Ver0209/T05C

承認



責任技術者



作成

R03.8.27

中澤

写真1：定期交換部品

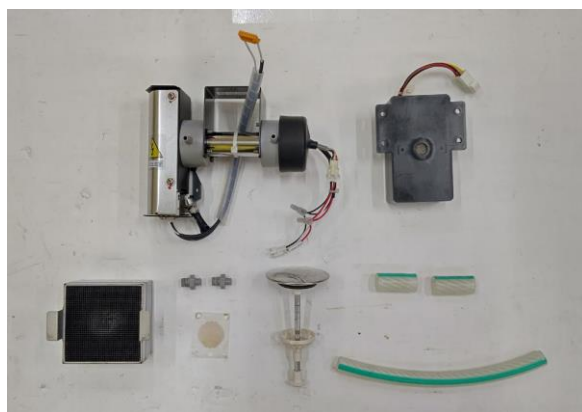


写真2：メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ、排気ファン、ドレンモータ、基板

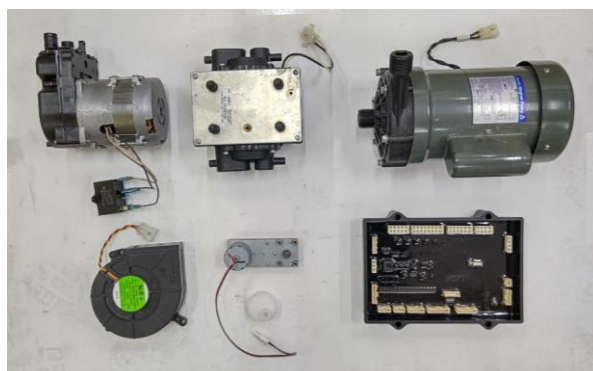


写真3：マニホールド電磁弁、ブロック、給水、酸素、アルコール電磁弁、リークチェック、チューブ類

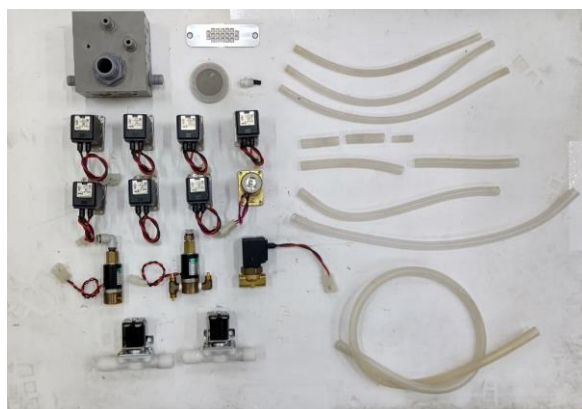


写真4：ドレンバルブ ASSY、パッキン、フタパッキン

