

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-79269

No. 210903

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S Plus
環営	環品	顧客名	楓クリニック 様	機番	500007
		所在地	東京都立川市泉町 935 番地の 1	納入日	2018 年 08 月 21 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	2021 年 08 月 26 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021 年 08 月 26 日

修理依頼・不具合内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。下記の通りご報告いたします。


〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

直流電源が故障して、タッチパネル及び圧力センサーに電源が入らない状態でした。分解点検したところ、直流電源に溶液が付着しており、洗剤（アイエスウォッシュ）であることが判明しました。こぼれた洗剤がカバーを浸透して機械内部の直流電源にかかったものと推察いたします。

写真 1：洗剤の浸透経路

写真 2：電源カバー

写真 3：直流電源

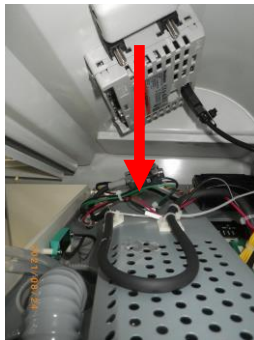

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71 ppm・・正常
- 3：装置情報

交換後運転回数：4 消毒：20/15、消毒＋アルコール：309/309、リークチェック：0
自己洗浄：8、アルコール単独：0、エア単独：6

交換部品

承認
松永
21.09.03
審査
中澤
21.09.03
作成
R03.9.3
中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
1	直流電源	1 台	