

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 4 年 1 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000V ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100672
作業年月日	令和 4 年 1 月 11 日	作業時間： Hr
顧客名	佐藤内科 様	TEL： 0285-53-1305
所在地	栃木県下野市石橋839-14	ご担当 君島 様
販売店	ニスコ株式会社 佐野営業所	ご担当 様
納入年月日	2013 年 1 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/2 E=302 濃度維持異常
7/3.9.13 E=207 オゾン水発生異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 673
オゾンセンサ	正常 ☒ 0	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありせん。次回が経過年数、使用回数に達するまで置いておき、オーバーホール
時ご検討下さい。

装置情報	交換後運転回数： 523 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 5388	殺菌/消毒+アル： 778
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1848	アルコール単独： 6 エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルター	糸巻き	☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

君島 和子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

