

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	14-05852	No. 210128
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	宮下 医院 様	機番	100806
環営	所在地	静岡県富士市平垣本町4番1号	納入日	2013年07月11日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		2020年09月17日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年11月18日

修理依頼・不具合内容

9/07～9/15の間に殺菌時給水異常（E:202）が10回発生している。
9/16は異常無く3回動いた

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

給水異常は再現しませんでした。推測になりますが、排水系統の汚れが「排水栓の閉まる動作」を阻害して「殺菌時給水異常」が発生したと思われます。これらの部品と、水位を検知する基板を交換して復旧いたしました。

写真1：ドレンバルブASSY

写真2：排水ポンプ、コントロール基板



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数 56 殺菌：1287、殺菌＋アルコール：4897、リークチェック：4
自己洗浄：1781、アルコール単独：6、エア単独：0

承認
松永
21.01.29
責任技術者
中澤
21.01.28
作成
R03. 1. 28
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンバルブASSY	1	
2	排水ポンプ	1	
3	コントロール基板	1	無償