

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210414
発行日 令和3年 4月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100072
作業年月日	2021年 3月 15日		作業時間:	Hr
顧客名	渡辺昭医院 様		TEL:	03-3651-6500
所在地	東京都葛飾区新小岩2-19-15		担当	
納入年月日	2010/9/8	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	オーバーホール ☒	修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容

各部点検 および オーバーホール

不具合原因、作業内容

保守点検 および オーバーホールを実施しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ｈｌ数 785
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

- ・タッチパネルの操作ボタンに一部変更があります。詳細は別紙をご参照ください。
- ・交換部品の詳細は別紙「100072号 工事写真」をご参照ください。

装置 情報	交換後運転回数: 945 → 0 更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 3688	殺菌+7L: 6053
	リークチェック: 5786 自己洗浄: 2228	7L単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
定期交換部品	☒	1 式	排気ファン	☒	1 式
ドレンバルブ ASSY1~2、DCE-タ、カム	☒	1 式	給水電磁弁	☒	1 式
配管チューブ、パッキン	☒	1 式	リークチェック配管	☒	1 式
メインポンプ	☒	1 式	ヒーター ASSY	☒	1 式
水槽	☒	1 式	コントロール基板 (Ver0209 / T05C)	☒	1 式
排水ポンプ	☒	1 式		☐	

修理業者 株式会社 IHI アグリテック 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤 21.4.14	2021/4/14 宮宗