

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 6 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301473
作業年月日	令和 3 年 6 月 10 日	作業時間： Hr
顧客名	渡辺内科クリニック 様	TEL： 028-638-0345
所在地	栃木県宇都宮市江野町6-13	ご担当 様
販売店	株式会社 アイエスエム	ご担当 様
納入年月日	2018 年 5 月 15 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
9/7. 9/11 F:302 濃度維持異常 → シャワー工程省略から実施に設定変更	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルス数 338
オゾンセンサ 正常 ☒ 0	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.07 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
残に問題はございません。	

装置 情報	交換後運転回数： 115	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 50	殺菌/消毒+7L： 512
	リークチェック： 0	自己洗浄： 436	7L単独： 28	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	給水・排水フィルター		☐	
オゾン水濃度計用フィルター		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 6 月 10 日

ご署名 渡辺 内美子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

