

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-54231

No. 191105

|     |     |                  |      |     |             |
|-----|-----|------------------|------|-----|-------------|
| 配布先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 東京支店 殿  |      | 機種  | OED-1000S   |
| 客先  | 顧客名 | さなだ消化器・乳腺クリニック 様 |      | 機番  | 300128      |
| 環営  | 所在地 | 静岡県三島市萩 259-4    |      | 納入日 | 2014年04月01日 |
| 環品  | 点検者 | 中澤一裕             | 作業時間 | 受付日 | 2019年08月20日 |
|     | 返送先 | 納入先と同じ           |      | 出荷日 | 2019年11月05日 |
| 計   | 3   |                  |      |     |             |

## 修理依頼・不具合内容

8/20 消毒時給水異常※ 4回発生

※消毒工程の給水に時間がかかると異常と判断します

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水栓を動かす「ポップアップ」が劣化しており、排水栓が完全に閉じない状態でした。  
このため、給水された水が溜まらず異常が発生しました。

この部品交換の他、内部清掃を実施して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



### [2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報


交換後運転回数：357 消毒：15、消毒+アルコール：4252、リークチェック：0

自己洗浄：1339、アルコール単独：4、エア単独：2

承認



審査

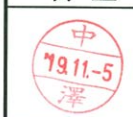

作成

R01.11.5

中澤

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称    | 数量 | 備考 |
|------|---------|----|----|
| 1    | ポップアップ  | 1台 |    |
| 2    | ドレンASSY | 1式 |    |
| 3    | 水槽フィルタ  | 1個 |    |