

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000-S		製造番号 : 300193
作業年月日	平成 27 年 1 月 13 日		作業時間 : Hr
顧客名	川島内科医院		TEL : 047-485-9109
所在地	千葉県八千代市勝田台7-30-5		担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社		担当 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検ソール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾン水生成注意(E:110) 7/16 7/29 8/11 8/20

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 2/2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 7/29 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

4-7 接続コネクタが反色の部品にかわりました。

4/28(火) 15:00 ~ 新設の手伝いに 訪問させて頂きました。

装置 情報	交換後運転回数 : 339	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌 : 142	殺菌+アル : 197
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 170	アルコール単独 : /	エア単独 : 8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓 (2個)		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 27 年 1 月 13 日

ご署名 川島内科医院

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

山本