

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100212
作業年月日	平成 27 年 1 月 14 日		作業時間: 約 1.5 Hr
顧客名	天羽診療所		TEL: 0439-67-2555
所在地	千葉県富津市売津139番地1		担当 様
販売店	有限会社 京葉新和		担当 様
納入年月日	平成 22 年 11 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 4 年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 407
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記定期交換部位の交換、作動確認実施。いつもキレイにご使用頂いております。
お手入れ洗浄（自己洗浄）の作動をお願い致します。

装置 情報	交換後運転回数:	82⇒0	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	263	殺菌+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	6	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 1 月 14 日

ご署名 今村 大朗

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋