

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                         |                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S                                                                    | 製造番号: 300109                                  |
| 作業年月日 | 平成 26 年 10 月 15 日                                                                       | 作業時間: 1.2 Hr                                  |
| 顧客名   | 大野クリニック                                                                                 | TEL: 0493-74-1868                             |
| 所在地   | 埼玉県比企郡小川町大字小川491                                                                        | 担当 様                                          |
| 販売店   |                                                                                         | 担当 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 25 年 10 月 24 日 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目         | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                             | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

|          |    |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサー  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 消毒槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |

|           |    |                                     |
|-----------|----|-------------------------------------|
| 消毒槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 消毒チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |

バルブ数 592

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

10月15日 12:26 運転動作正常

|          |              |                |              |           |
|----------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 217 | 更新（リセット）実施・未実施 | 消毒: 128      | 消毒+7L: 89 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 35       | 7Lアルコール単独: 0 | エア単独: 0   |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

426 年 10 月 15 日

ご署名

佐藤 尚幸

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

