

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100632
作業年月日	平成 26 年 10 月 23 日		作業時間: Hr
顧客名	寒川病院		TEL: 0467-75-6680
所在地	神奈川県高座郡寒川町宮山193		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 24 年 2 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張 ・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 900
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

内視鏡接続コネクタが灰色の汚れが付着していた。洗浄し、正常動作を確認。26年10月23日 427.5Aにリ
モーター
18.12.19

装置 情報	交換後運転回数: 1618	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 3097	殺菌+7L: 2267
	リークチェック: 2268	自己洗浄: 662	7L単独: 0	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	コントロール箱 (PA)		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年 10 月 23 日

ご署名 下津 ひとし 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

