

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100535
作業年月日	平成 27 年 9 月 4 日	作業時間: 約 1 Hr
顧客名	河上医院様	TEL: 0296-37-2460
所在地	茨城県筑西市舟生1059-3	担当 様
販売店	株式会社 メディセオ	担当 様
納入年月日	H25年 2月 5日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ その他(交換)	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

給水フィルター-2種類交換 (糸巻毛)(活性炭)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 524
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☐	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

フィルター交換・作業完了。給水の水量が少くエラー音が最初になつています。
その他作動は問題なし。

装置 情報	交換後運転回数: 127	更新(リセット)実施 ☒ 未実施	殺菌: 673	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 409	自己洗浄: 580	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
給水フィルター(糸巻毛)		☒	1			☐	
給水フィルター(活性炭)		☒	1			☐	
(交換前フィルターには汚水を確認しました。)		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H27 年 9 月 4 日

ご署名 河上隆太郎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者