

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2年 11 月 30 日

|       |                                                                                                                               |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         | 製造番号： 300050      |
| 作業年月日 | 令和 2 年 11 月 30 日                                                                                                              | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 大越クリニック 様                                                                                                                     | TEL： 045-978-5511 |
| 所在地   | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-4-3 3F                                                                                                         | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社 MMコーポレーション                                                                                                               | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 25 年 8 月 2 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                         | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 7 年 6 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/10 給水異常 4件

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

|          |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 639    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0~1                         | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    | <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

不具合異常無し

|      |                                |            |                |
|------|--------------------------------|------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 431 更新(リセット) (実施)・未実施 | 殺菌/消毒： 16  | 殺菌/消毒+7L： 3685 |
|      | リークチェック： 1 自己洗浄： 1628          | アルコール単独： 0 | エア単独： 788      |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称         | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|----------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤             |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽/チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

中村

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

