

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____

発行日 _____

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 300050
作業年月日	平成 26 年 8 月 11 日	作業時間: _____ Hr
顧客名	大越クリニック	TEL: 045-978-5511
所在地	神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-4-3F	担当 様
販売店	株式会社MMコーポレーション	担当 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 2 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/15 排水注意 X3

1/18 排水注意

5/9 水位低下異常

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

(1回目無償)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 736
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

① 12'420 ② 10'325

排水状態正常

装置情報	交換後運転回数: 486	更新（リット）実施・未実施	殺菌: 6	殺菌+7L: 480
	リークチェック: 0	自己洗浄: 226	7L単独: 0	エア単独: 415

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

426 年 8 月 11 日

ご署名

中村

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

